

Sanosil S010 HC

Desinfeksjonsmiddel for svært kontaminerte overflater

Klar til bruk



BESKRIVELSE

Sanosil S010 HC er et effektivt og fleksibelt desinfeksjonsmiddel for desinfisering av svært kontaminerte overflater. Sanosil S010 er basert på Sanosils velkjente formel med hydrogenperoksid og sølv, og er spesielt egnet for overflater der vask før desinfisering ikke er mulig eller overflater som må desinfiseres raskt.

INFORMASJON

Egnet for:
Overflatedesinfeksjon

Effektiv mot:
Bakterier
Virus
Gjær
Sopp
Endosporer

Holdbarhetsdato:
2 år

Innhold:
5% H₂O₂
0.005% Ag

Sanosil Norge AS
post@sanosil.no
www.sanosil.no


VIRKEMÅTE

Den aktive substansen i Sanosil S010 er hydrogenperoksid, som brytes ned til oksygen og vann. I en komplisert fremstillingsprosess blir den aktive substansen forsterket med sølvioner. Dette gir en økt effekt mot mikroorganismer og forhindrer samtidig ny kontaminering.

Oksygen (O₂) skilles ut fra hydrogenperoksid, og angriper celleveggen til mikroorganismen.

(1) Den kjemiske reaksjonen mellom oksygen og celleveggen fører til at celleveggen denatureres og ødelegges.

(2) Effekten økes ved at sølvionene bindes til disulfidbroer i visse proteiner hos mikroorganismen. Dermed inaktiveres og ødelegges disse proteinene slik at ny kontaminering forhindres.

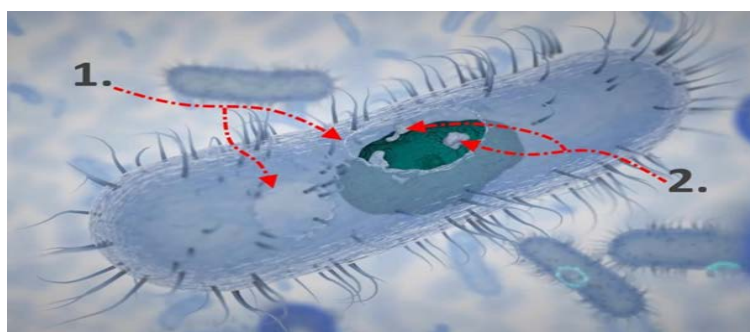

Tradisjonell desinfeksjon

1. Rengjør overflatene som skal desinifiseres. Desto renere overflater, desto bedre resultat ved desinifisering.
2. Fukt en mikrofiberklut eller annen vasketekstil med Sanosil S010 HC
3. Påfør løsningen slik at det sitter igjen et tynt lag desinfeksjonsmiddel på alle overflater. Områder med ujevne overflater eller absorberende materialer kan sprayeres direkte med en sprayflaske. Unngå at store dråper sitter igjen.
4. La desinfeksjonsmiddelet tørke. Overflatene trenger ikke skylles etter desinfeksjon.

Overflatedesinfeksjon med tåkegenerator

1. Rengjør overflatene som skal desinifiseres. Desto renere overflater, desto bedre resultater ved desinifisering.
2. Fyll passende mengde Sanosil S010 i tåkegeneratoren Sanosil EasyFog. Anbefalt mengde: 5-15 ml/m³ romvolum.
3. Juster tåkegeneratoren til en fin dis og spray desinfeksjonsmiddelet i rommene som skal desinifiseres. Benytt alltid munnbind eller maske for å beskytte ånderettorganer. Desinfiser alltid innerste del av rommet først og avslutt ved utgangen. Lukk døren til rommet under desinfeksjonsmiddelet virketid.
4. La disen/tåken sette seg i 60-120 minutter, avhengig av tettheten på dråpene. Ikke la mennesker eller dyr oppholde seg i rommet under virketiden, da desinfeksjonsmiddelet kan pustes inn før det har satt seg på overflatene.



Bruk biocider med forsiktighet. Les alltid pakningsvedlegget og produktinformasjonen før bruk.

Våre operasjonsinstruksjoner, både muntlige og skriftlige, er basert på nøyte testing. Våre råd gis basert på vår kunnskap om produktet, men er ikke bindende da bruk- og lagringsforhold hos den enkelte bruker ligger utenfor vår kontroll.

Produktbeskrivelser og detaljerte stoffegenskaper innebærer ikke erstatningsansvar ved skader.



SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE 